

Urgent[®] PC

NEUROMODULATION SYSTEM

Tratamiento para la vejiga hiperactiva

El sistema Urgent PC

- » **Estimulador Urgent PC:** genera impulsos eléctricos.
- » **Electrodo de aguja:** transfiere impulsos al nervio tibial.
- » **Conjunto de cables:** conecta la almohadilla adhesiva, el electrodo de aguja y el estimulador.



1. Póngase cómodo

Durante el tratamiento, se sentará con el pie apoyado, con un electrodo de aguja fina introducido cerca del tobillo. Los impulsos del estimulador viajan por el electrodo de aguja, a lo largo de su pierna y hacia los nervios de la pelvis que controlan la función de la vejiga.



2. Coloque la aguja

Su médico presionará sobre su tobillo a fin de encontrar el lugar adecuado para introducir el electrodo de aguja y luego limpiará ese lugar. Es posible que sienta la punción de la aguja mientras atraviesa la piel y se introduce.



3. Conecte el estimulador

Su médico colocará un parche redondo en la base de su pie y una grapa en el electrodo de aguja. Estos lo conectan al estimulador.




4. Ajuste el tratamiento

Su médico encenderá el estimulador y lentamente aumentará los impulsos. Le preguntará qué siente y le pedirá que observe cualquier movimiento en los dedos. Sus dedos pueden flexionarse o desplegarse, o es posible que sienta una suave sensación en el tobillo, en la base del pie o en el talón.

Si no hay respuesta: Su médico puede ajustar la aguja o el estimulador, o probar en el otro tobillo.

Si se siente incómodo: ¡Dígaselo a su médico de inmediato! Su médico puede ajustar la aguja, reducir el nivel de estimulación o probar en el otro tobillo.

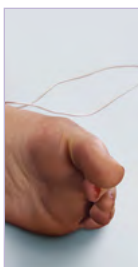

Toe Flex



Toe Fan

5. Durante el tratamiento

Siéntese cómodamente durante su tratamiento de treinta minutos. Su médico puede hacer cambios durante el tratamiento si es necesario. Al final, su médico lo desconectará, y usted podrá volver a la actividad normal.



Durante el tratamiento

- » 12 tratamientos de 30 minutos cada semana
- » Tratamientos ocasionales, habitualmente una vez por mes, para mantener los resultados

**Para obtener
más información,
visite el sitio web
www.urgentpcinfo.com.**

Cogentix Medical, Inc.

5420 Feltl Rd, Minnetonka, MN 55343

Urgent PC está indicado para el tratamiento de la vejiga hiperactiva y de los síntomas asociados con la urgencia urinaria, la frecuencia urinaria y la incontinencia de urgencia. **CONTRAINDICACIONES:** Pacientes con marcapasos o desfibriladores implantables, pacientes con tendencia a hemorragia excesiva, pacientes con daño nervioso que pudiera impactar en el funcionamiento del nervio tibial o del piso pélvico percutáneo, o pacientes embarazadas o que planean quedar embarazadas durante el curso del tratamiento. **PRECAUCIONES:** Pacientes con problemas cardíacos relacionados con marcapasos. Entre los efectos secundarios más comunes, se incluye dolor leve temporal o inflamación de la piel en el lugar de la estimulación o cerca de él. **ADVERTENCIA:** La venta de este dispositivo debe efectuarse por un médico o bajo prescripción de un médico de acuerdo con la legislación federal (en los EE. UU.). Para obtener instrucciones completas sobre uso, almacenamiento, advertencias, indicaciones, contraindicaciones, precauciones, reacciones adversas y exención de responsabilidad de garantía, remítase al folleto que acompaña a cada producto Urgent PC o visite el sitio web www.cogentixmedical.com. Urgent son marcas comerciales registradas de Cogentix Medical. Uroplasty LLC es el fabricante de Urgent PC. Los modelos se muestran únicamente con fines ilustrativos. © 2015 Cogentix Medical. Todos los derechos reservados. 20214D-Spanish 06/17